

TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je op de aanwezigheid van het **Humaan Papillomavirus (HPV)**, en eventueel welk type van het virus. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium. Uitslagen worden geautoriseerd door een klinisch moleculaire bioloog (pathologie). Je vraagt zelf de uitslag op via **testalize.me/be/uitslag** met de code op de codekaart.

Neem contact op met je huisarts als zich tijdens of na de afname een onverwachte situatie voordoet die niet in deze bijsluiter staat beschreven.

 Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 25-05-2023 | Bewaarconditie van de afnameset: 2 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 2 °C tot 30 °C



testalize.me

BIJSLUITER

BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.

Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!



HPV TEST
VROUW

Let op: Niet gebruiken tijdens zwangerschap of binnen 3 maanden na bevalling.

GEBRUIK



A RETOURBOX



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
C CODEKAART



D SWAB IN KOKER*



B BIJSLUITER



E SEALBAG**

* Floqswabs | Copan Italia SpA.

** sealbag | Daklapack



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!



Haal het wattenstaafje (D) uit de koker door te draaien aan de dop. Laat de barcode op de buis zitten. Dit is de identificatie.



Spreid de schaamlippen*, houd het wattenstaafje (D) bij de dop vast. Breng het wattenstaafje 5 cm in de vagina. Strijk 30 seconden langs de vaginawand.



Doe het wattenstaafje nu terug in de koker. En doe de koker dan in de sealbag (E). Leg de gevulde sealbag in de retourbox. Klik de retourbox dicht.



De retourbox verstuur je nu naar ons labo. Dit doe je als (brievenbus) pakket met track&trace. Kies zelf een vervoerder. Het adres van ons labo staat op de retourbox.

Vraag binnen 5 werkdagen na ontvangst in het lab (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/be/uitslag.

* Neem een makkelijke houding aan, vergelijkbaar met de houding voor het inbrengen van een tampon