

TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je op **Intieme Gezondheid**. We gebruiken dit verzamelbegrip om de 3-in-1 test op Bacteriële Vaginose, Candida en Trichomonas te beschrijven. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium. Je vraagt zelf de uitslag op via testalize.me/be/uitslag met de code op de codekaart.

 Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 25-05-2023 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C



testalize.me



INTIEME
GEZONDHEID

BIJSLUITER

BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op. Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

GEBRUIK



A RETOURBOX



C CODEKAART



D BUISJE*



E WATTENSTAAFJE**



B BIJSLUITER



F SEALBAG***

* buisje | Aptima® Multitest Swab Transport Medium (STM) | Hologic Inc.

** wattenstaafje | Aptima® Multitest Swab (SW) CE0843 MDD 93/42/EEC | Hologic Inc.

*** sealbag | Daklapack

1



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.

2



Spreid de schaamlippen*, houd het wattenstaafje (E) op de breuklijn vast. Breng het wattenstaafje 5 cm in de vagina. Strijk 30 seconden langs de vaginawand.

3



Draai het buisje open. Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn.

4



Draai het buisje goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht. Doe de sealbag in de retourbox en vouw deze dicht.

5



De retourbox verstuur je nu naar ons labo. Dit doe je als (brievenbus) pakket met track&trace. Kies zelf een vervoerder. Het adres van ons labo staat op de retourbox.

Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/be/uitslag.

* neem een makkelijke houding aan, vergelijkbaar met de houding voor het inbrengen van een tampon.