

TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je oraal (keel) op **Chlamydia** en **Gonorroe**. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via testalize.me/be/uitslag met de code op de codekaart.

 Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 25-05-2023 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C



SOA-TEST ORAAL
Chlamydia en Gonorroe

BIJSLUITER

Test pas **14 dagen** na het laatste onveilige seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.
Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

GEBRUIK



A RETOURBOX



C CODEKAART



D BUISJE*



E WATTENSTAAFJE**



B BIJSLUITER



F SEALBAG***

* buisje | Aptima® Multitest Swab Transport Medium (STM) | Hologic Inc.

** wattenstaafje | Aptima® Multitest Swab (SW) CE0843 MDD 93/42/EEC | Hologic Inc.

*** sealbag | Daklapack

1



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.

2




Haal het wattenstaafje (E) uit de verpakking. Zorg dat het nergens mee in aanraking komt. Houd het wattenstaafje op de breuklijn vast.

3



Doe het wattenstaafje in de mond en strijk langs de zijkanten en achterkant van je keel. Haal het nu uit de mond en raak tong of wangen niet aan.

4

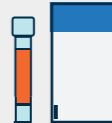

Draai het buisje open. Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn. Draai het buisje nu goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht.

5



De retourbox verstuur je nu naar ons labo. Dit doe je als (brievenbus) pakket met track&trace. Kies zelf een vervoerder. Het adres van ons labo staat op de retourbox.

Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/be/uitslag.