

# TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je genitaal (vagina) op **Mycoplasma**. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via **testalize.me/uitslag** met de code op de codekaart.

Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 03-12-2020 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C



testalize.me

# BIJSLUITER

Test pas **14 dagen** na het laatste onveilige seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

**SOA-TEST VROUW**  
Mycoplasma genitalium

## BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.  
Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

# GEBRUIK



**A** RETOURBOX



**B** BIJSLUITER



**C** CODEKAART



**D** BUISJE\*



**E** WATTENSTAAFJE\*\*



**F** SEALBAG\*\*\*

\* buisje | Aptima® Multitest Swab Transport Medium (STM) | Hologic Inc.

\*\* wattenstaafje | Aptima® Multitest Swab (SW) CE0843 MDD 93/42/EEC | Hologic Inc.

\*\*\* sealbag | Daklapack

1



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.

2



Spreid de schaamlippen\*, houd het wattenstaafje (E) op de breuklijn vast. Breng het wattenstaafje 5 cm in de vagina. Strijk 30 seconden langs de vaginawand.

3



Draai het buisje open. Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn.

4



Draai het buisje goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht. Doe de sealbag in de retourbox en vouw deze dicht.

5



De retourbox verstuur je nu via de PostNL **brievenbus** naar ons lab ([testalize.me/retourbox](https://testalize.me/retourbox)).



Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via [testalize.me/uitslag](https://testalize.me/uitslag).

\* neem een makkelijke houding aan, vergelijkbaar met de houding voor het inbrengen van een tampon.