

TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je rectaal (anus) op **Chlamydia** en **Gonorroe**. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via **testalize.me/uitslag** met de code op de codekaart.

Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 16-11-2020 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C



BIJSLUITER

Test pas **14 dagen** na het laatste onveilige seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

SOA-TEST ANAAL
Chlamydia en Gonorroe

BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.
Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

GEBRUIK



A RETOURBOX



B BIJSLUITER



C CODEKAART



D BUISJE*



E WATTENSTAAFJE**



F SEALBAG***

* buisje | Aptima® Multitest Swab Transport Medium (STM) | Hologic Inc.

** wattenstaafje | Aptima® Multitest Swab (SW) CE0843 MDD 93/42/EEC | Hologic Inc.

*** sealbag | Daklapack



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.



Haal het wattenstaafje (E) uit de verpakking. Zorg dat het nergens mee in aanraking komt. Houd het wattenstaafje op de breuklijn vast.



Doe het wattenstaafje voorzichtig 3-5 cm in de anus en draai het 5-10 seconden rond. Haal het dan terug zonder de huid aan te raken.



Draai het buisje open. Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn. Draai het buisje nu goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht.



Doe de gevulde sealbag in de retourbox en sluit de box. De retourbox verstuur je nu via de PostNL brievenbus naar ons lab (testalize.me/retourbox).

Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/uitslag.