


# TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je genitaal (penis) op **Mycoplasma**. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via **testalize.me/uitslag** met de code op de codekaart.

Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 03-12-2020 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C

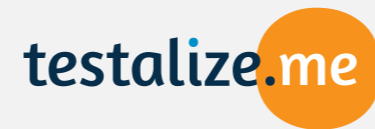

## BIJSLUITER

Test pas **28 dagen** na het laatste onveilige seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

**SOA-TEST MAN**  
Mycoplasma genitalium

### BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.  
Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

# GEBRUIK



**A** RETOURBOX




**B** BIJSLUITER



**C** CODEKAART



**D** BUISJE\*

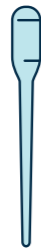

**E** PIPET\*\*



**F** SEALBAG\*\*\*

\* buisje | Aptima® Urine Specimen Transport Tube | Hologic Inc.

\*\* pipet | Hologic Inc.

\*\*\* sealbag | Daklapack

1



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.

2



Zorg dat je minimaal 1 uur niet hebt geplast. Neem een schone beker (bijv. wegwerpbeker) en vang de eerste druppels/straal van je urine op (max. 30 ml).

3



Draai het buisje open. Gebruik de pipet (E) om 2 ml urine in het buisje te brengen. De urine moet tussen de zwarte lijntjes komen.

4



Draai het buisje goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht. Doe de sealbag in de retourbox en vouw deze dicht.

5



De retourbox verstuur je nu via de PostNL **brievbus** naar ons lab ([testalize.me/retourbox](https://testalize.me/retourbox)).



Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via [testalize.me/uitslag](https://testalize.me/uitslag).