

TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je genitaal (penis) op **Chlamydia** en **Gonorroe**. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via **testalize.me/uitslag** met de code op de codekaart.

Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 11-11-2020 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C



BIJSLUITER

Test pas **14 dagen** na het laatste onveilige seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

SOA-TEST MAN
Chlamydia en Gonorroe

BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.
Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!


GEBRUIK



A RETOURBOX




B BIJSLUITER

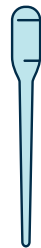

E PIPET**



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D BUISJE*



F SEALBAG***



C CODEKAART

1



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.

2



Zorg dat je minimaal 1 uur niet hebt geplast. Neem een schone beker (bijv. wegwerpbeker) en vang de eerste druppels/straal van je urine op (max. 30 ml).

3



Draai het buisje open. Gebruik de pipet (E) om 2 ml urine in het buisje te brengen. De urine moet tussen de zwarte lijntjes komen.

4



Draai het buisje goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht. Doe de sealbag in de retourbox en vouw deze dicht.

5



De retourbox verstuur je nu via de PostNL **brievenbus** naar ons lab (testalize.me/retourbox).



* buisje | Aptima® Urine Specimen Transport Tube | Hologic Inc.

** pipet | Hologic Inc.

*** sealbag | Daklapack

Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/uitslag.