


TEST JEZELF

Met deze afnamekit test je genitaal (vagina) op **Mycoplasma**. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons laboratorium (ISO-15189). Uitslagen worden geautoriseerd door een microbioloog. Je vraagt zelf de uitslag op via **testalize.me/uitslag** met de code op de codekaart.

Testalize.me | Rotterdam | Nederland | <https://testalize.me>

Revisiedatum: 03-12-2020 | Bewaarconditie van de afnameset: 15 °C tot 30 °C | Transportconditie van de retourbox: 1 °C tot 30 °C

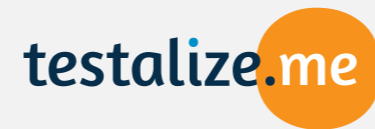

BIJSLUITER

Test pas **28 dagen** na het laatste onveilige seksuele contact. Eerder testen heeft geen zin!

SOA-TEST VROUW
Mycoplasma genitalium

BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op.
Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

GEBRUIK



A RETOURBOX



B BIJSLUITER



C CODEKAART



D BUISJE*



E WATTENSTAAFJE**



F SEALBAG***

* buisje | Aptima® Multitest Swab Transport Medium (STM) | Hologic Inc.

** wattenstaafje | Aptima® Multitest Swab (SW) CE0843 MDD 93/42/EEC | Hologic Inc.

*** sealbag | Daklapack

1



Haal de codekaart (C) uit de retourbox (A) en bewaar deze code!

Laat de vloeistof in het buisje (D) en vermijd huidcontact. Niet om in te nemen.

2



Spreid de schaamlippen*, houd het wattenstaafje (E) op de breuklijn vast. Breng het wattenstaafje 5 cm in de vagina. Strijk 30 seconden langs de vaginawand.

3



Draai het buisje open. Doe het wattenstaafje erin en breek het af op de breuklijn.

4



Draai het buisje goed dicht. Stop het in de sealbag (F) en plak deze dicht. Doe de sealbag in de retourbox en vouw deze dicht.

5



De retourbox verstuur je nu via de PostNL **brievenbus** naar ons lab (testalize.me/retourbox).



Vraag binnen 48 uur na ontvangst (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/uitslag.

* neem een makkelijke houding aan, vergelijkbaar met de houding voor het inbrengen van een tampon.